

DOPPELSCHUTZKISSEN aus Epithelium 26®

INDIKATION

Zur Vorbeugung und Linderung von Vorfuß-Schmerzen (Schwielen, Hitzegefühl, langes Stehen...) sowie von Schmerzen, die durch verstärkte Reibung am Hallux Valgus verursacht sind.

GEGENANZEIGEN

- Nicht über einer Hautverletzung tragen.
- Personen, die an Arterienentzündungen, Diabetes, Polyneuritis, Neuropathien der unteren Extremitäten oder Veneninsuffizienz leiden: Wenden Sie das Produkt niemals auf einer offenen Wunde an. Beobachten Sie den Fuß während der Anwendung und holen Sie in jedem Fall den Rat Ihres Arztes oder Podologen ein.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Vor der ersten Anwendung waschen.
- Direkt auf der Haut tragen.
- Der bedruckte Teil des Gewebes muss in Kontakt mit der Fußsohle sein. Produkt nicht auf links drehen.
- Schieben Sie den Fuß auf das Doppelschutzkissen und platzieren Sie die Halteschleife zwischen der großen und der zweiten Zehe.
- Für einen optimalen Tragekomfort nicht barfuß tragen, sondern Strümpfe darüber ziehen. Diese müssen weit genug sein, um so ein Zusammendrücken der Füße zu vermeiden.

EIGENSCHAFTEN

- Epithelium 26® ist ein von Podologen patentierter echter «Fußballenersatz». Aufgrund seiner mechanischen Eigenschaften ersetzt dieses Silikongel die fehlende natürliche Funktion des Fußballens, welche die Ursache der Schmerzen ist: Es verteilt das Körpergewicht über den gesamten Belastungsbereich.
- Dank der Anwendung von Epithelium 26® im Fußsohlenbereich und auf dem Hallux Valgus kann das Doppelschutzkissen Schmerzen wirksam lindern, ohne jedoch zusätzlichen Druck auszuüben.

Die Doppelschutzkissen haben lediglich eine Schutzfunktion und sind nicht für die Korrektur des Hallux Valgus bestimmt.

REINIGUNG

- In der Waschmaschine bei 30°C im mitgelieferten Wäschenetz oder von Hand waschen (nicht reiben).
- An der Luft trocknen lassen. Nicht bügeln.

ZUSAMMENSETZUNG: 85% Silikon, 15% Polyamid/Elasthan.

Die Materialien wurden allen vorgeschriebenen Tests der ISO 10993-1 Norm, welche Produkte mit direktem Hautkontakt betreffen, unterzogen. Sollte eine Hautreaktion auftreten, sollten Sie die Anwendung sofort unterbrechen und die Firma MILLET Innovation benachrichtigen.

Im Fall unsachgemäßer Anwendung und Nichtbeachtung der Herstellerhinweise kann MILLET Innovation keine Haftung übernehmen. Die maßgebende Sprache ist Französisch. Ursprüngliche CE-Kennzeichnung: 2001.



Maschinenwäsche
30°C.



Nicht bügeln
(kein Dampf).



Nicht chemisch
reinigen.



Bleichen mit Chlor
nicht erlaubt.



Nicht
maschinentrocknen.



LOT Siehe Verpackung.